



Yours Health Test

Corona

Deze handleiding geldt voor de volgende symptomen

- Koorts
 - Hoesten
 - Keelpijn
 - Spierpijn
 - Hoofdpijn
 - Neusverkoudheid
 - Vermoeidheid, uitputting
-

Wat meet de test?

Deze thuistest brengt Bepaling van SARS-CoV-2 Antistoffen (IgG) in kaart. Het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 beheerst momenteel de levens van miljoenen mensen wereldwijd. Op 12 maart 2020 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) deze nieuwe infectieziekte, waarvan het klinische beeld bekend staat als COVID-19, tot een wereldwijde pandemie uitgeroepen.

Vooraf: [Lees eerst de handleiding helemaal door voordat je aan de uitvoering van de test begint!](#)

Bloedtest :



Man & vrouw:



Is het testpakket volledig?

Controleer a.u.b. of de testset volledig is. Het moet bevatten:

- 1 handleiding voor je monsterafname, incl. handleiding voor het opvragen van de uitslagen en garantieformulier.
- 1 monsterbegeleidingsformulier
- 1 zip-bag met 1 Protein Saver Card.
- 1 folieverpakking met 2 lancetten, 2 alcoholdoekjes, 1 gaasje en 1 pleister.
- 1 verzendenvolop

1. Verzending moet op maandag of dinsdag (voor de buslichting) plaatsvinden, niet voor het weekend of voor de feestdagen!
2. Voer de test a.u.b. nuchter uit, het beste in de ochtenduren na het opstaan.
3. Neem de Protein Saver Card, de beide lancetten, de 2 alcoholdoekjes en de pleister uit de verpakking en leg de materialen klaar voor de monsterafname.
4. Was de handen met zeep en warm water voor een goede doorbloeding van de handen.
5. Droog de handen met een schone en droge doek af.

Test voorbereiding

Test-Uitvoering

Bosberg 41,
7271 LE, Borculo

info@yourshealthtest.nl

Tel: + (0)88 – 00 75 744



Yours Health Test

Corona


1. Desinfecteer de gewenste prikplaats met een alcoholdoekje. A.u.b. daarna de vinger volledig laten drogen!



2. Neem een lancet in de hand en draai de lila verzegeling eraf.



3. Zet het lancet stevig op de prikplaats aan de zijkant van de vingertop. Houd het lancet, zoals een spuit, tussen de vingers (Afb. 3).

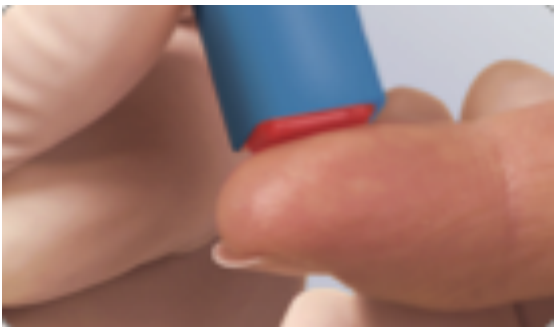

4. Voor het in werking stellen van het mechanisme drukt u het lancet stevig tegen de prikplaats. Vervolgens drukt u krachtig op de lil drukknop de naald naar buiten.
5. Veeg de eerste bloeddruppels met het gaasje weg.



6. De volgende bloeddruppels laat u van links naar rechts op de eerste twee cirkels van de Protein SAver Card druppelen. De cirkels moeten goed gevuld en tot buiten de lijntjes gevuld zijn.



Door het masseren van de vingers in de richting van de vingertoppen kunt u de vorming van de bloeddruppels bevorderen. Druk niet te hard op de vinger, omdat dan het testresultaat vervalst zou kunnen worden.



Yours Health Test

Corona

Als er onvoldoende druppelvorming (bloeding) is, moet het tweede lancet op een andere plek gebruikt worden

7. De prikplaats veegt u met het tweede alcoholdoekje af. Daarna plakt u de pleister op de prikplaats.
8. Laat de Protein Saver Card 2 uur bij kamertemperatuur drogen.
9. Na deze 2 uur sluit u de Protein Saver Card.
10. Neem nu een barcode-etiket van het monsterbegeleidingsformulier en plak dit op de Protein Saver Card.
11. Stop de Protein Saver Card in de zip-bag en sluit deze. Bewaar de zip-bag tot aan het moment van verzending bij kamertemperatuur.
12. Het gebruikte lancet/de gebruikte lancetten en de verpakkingen kunnen bij het huisvuil.
13. Voor de verzending doet u de zip-bag met de Protein Saver Card samen met het ingevulde monsterbegeleidingsformulier in de bijgesloten verzendenvelop. Stuur deze direct naar ons laboratorium retour.

Verzending van de monsters

Stop het verzendbuisje met het ingevulde en ondertekende monsterbegeleidingsformulier in de verzendenvelop en sluit deze met zorg. Verwijder hiervoor de beschermfolie aan de binnenkant van het blauwe plakband en druk de sluitpunten stevig tegen elkaar aan.

Attentie: Je kunt de verzendenvelop daarna niet meer openen.

Bewaar de verzendenvelop tot aan de retourzending in de koelkast. De retourzending kan uitsluitend plaatsvinden op maandag of dinsdag door de verzendenvelop te deponeren bij een PostNL afgiftepunt dan wel in een PostNL brievenbus.

Let op! Geen retourzending op andere dagen of voor (en op) feestdagen. Geef bij extreme hitte of bij vorst de verzendenvelop bij voorkeur af bij een PostNL afgiftepunt. De retourzending is altijd gratis, betaal dus nooit verzendkosten.

Dank voor de medewerking.

Yours Health Test