

Yours Health Test

SOA & Plus

Deze handleiding geldt voor de volgende symptomen

- Afscheiding
 - Beestjes
 - Blaasjes
 - Bloedverlies
 - Branderig gevoel
 - Bultjes
 - Irritatie
 - Jeuk
 - Pijn
 - Schilfers
 - Wratten
 - Zweertjes
 - Rode huid
-

Wat meet de test?

Bepaling van 7 bacteriële seksueel overdraagbare aandoeningen (soa's) met behulp van PCR-analyse. De urine wordt onderzocht op belangrijke bacteriële ziektekiemen. In de SOA Plus urinetest worden daarnaast ook drie mycotische pathogenen bepaald (schimmels).

Vooraf: [Lees eerst de handleiding helemaal door voordat je aan de uitvoering van de test begint.](#)

Urinetest:



Man & vrouw:

Is het testpakket volledig?

Controleer a.u.b. of de testset volledig is.

Het moet bevatten:

- Een handleiding voor je monsterafname.
- 1 Urinebuisje (monovette) incl. etiket en geel tuitje
- 1 urinebeker
- Een garantieformulier.
- Een handleiding voor je resultaten.

- Een verzendbuisje.
- Een monsterbegeleidingsformulier.
- Een retourenvelop.


Test voorbereiding

1. We adviseren u om op de avond voor de monsternamen 's nachts het nuttigen van

Bosberg 41,
7271 LE, Borculo

info@yourshealthtest.nl

Tel: + (0)88 – 00 75 744

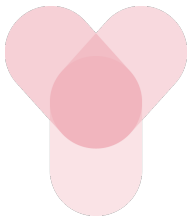

Yours Health Test

SOA & Plus

- grote hoeveelheden vloeistof (meer dan 1 liter) te vermijden.
2. Voordat het opvangen van de eerste straal ochtendurine, mag gedurende ongeveer 6 uur ('s nachts) geen urine worden uitgescheiden.

Houd rekening met het volgende: Als u na middernacht moet plassen en er zijn ongeveer 6 uur verstreken sinds de laatste keer plassen, dan kan ook dit urinemonster verzameld worden.

Test-Uitvoering

1. Als monster wordt de eerste straal urine van de eerste ochtendurine gebruikt.
2. Vang de allereerste 15-20 ml van uw ochtendurine op in de urinebeker en laat vervolgens de rest in het toilet lopen.
3. Pak nu het gele staafje tuitje en het gele urinebuisje, draai het voorste deel van de gele dop eraf en zet het tuitje erop.
4. Doop het gele tuitje in de urine en neem met dit buisje een deel van de urine uit de urinebeker door van achter de stempel volledig uit te trekken. Het urinebuisje moet volledig gevuld worden.
5. Haal het gele tuitje ervan af en sluit vervolgens het urinebuisje weer zorgvuldig met de gele dop.
6. Breek de uitgetrokken stempel bij het afbreekpunt af zodat deze niet meer uitsteekt.


7. Doe het urinebuisje in het verzendbuisje en sluit het verzendbuisje goed.
8. Het tuitje, de afgebroken stempel en de urinebeker kunnen bij het huisvuil doen.
9. Doe het verzendbuisje samen met het ingevulde en ondertekende monsterbegeleidingsformulier in de verzendenvelop en stuur deze per post aan ons laboratorium retour.

Verzending van de monsters

Stop het verzendbuisje met het ingevulde en ondertekende monsterbegeleidingsformulier in de verzendenvelop en sluit deze met zorg. Verwijder hiervoor de beschermfolie aan de binnenkant van het blauwe plakband en druk de sluitpunten stevig tegen elkaar aan.

Attentie: Je kunt de verzendenvelop daarna niet meer openen.

Bewaar de verzendenvelop tot aan de retourzending in de koelkast. De retourzending kan uitsluitend plaats vinden op maandag of dinsdag door de verzendenvelop te deponeren bij een PostNL afgiftepunt dan wel in een PostNL brievenbus.

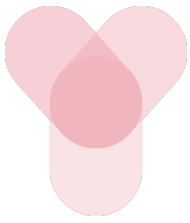

Yours Health Test

SOA & Plus

Let op! Geen retourzending op andere dagen of voor (en op) feestdagen. Geef bij extreme hitte of bij vorst de verzendvelop bij voorkeur af bij een PostNL afgiftepunt. De retourzending is altijd gratis, betaal dus nooit verzendkosten.

Dank voor de medewerking.

Yours Health Test